



Lingettes sporicides à base d'acide peracétique pour la désinfection de dispositifs médicaux et de surfaces en tout genre.

## mikrozid® PAA wipes

### Notre plus

- sporicide en seulement 5 minutes
- se conservent pendant 28 jours après ouverture
- prêtes à l'emploi - aucune activation requise
- homologuées pour les sondes TEE\*
- en particulier un grand tissu de 20 x 30 cm

### Domaines d'utilisation

Grâce à leur vaste champ d'action et leur délai d'action court, les lingettes mikrozid® PAA sont idéales pour la désinfection dans les zones présentant un grand risque de transmission de germes pathogènes. Citons par ex. les chambres d'isolement, les blocs opératoires, les soins intensifs, le côté impur dans le service central de stérilisation / l'endoscopie ou la néonatalogie. Les lingettes conviennent à la désinfection de dispositifs médicaux [ 0297] et d'autres surfaces en tout genre. L'un des principaux champs d'application sont: Les surfaces à proximité immédiate des patients, souvent en contact avec les mains et la peau. En raison du grand champ d'action et de leur compatibilité avec les matériaux de tout genre, les lingettes mikrozid® PAA sont également recommandées pour la préparation de dispositifs médicaux sans canaux.

Exemples :

- Sondes TEE\*
- Nasopharyngoscope (ORL)
- Sondes ultrasons\*

En vertu de leur action sporicide, les lingettes mikrozid® PAA peuvent contribuer de manière déterminante à la rupture des chaînes d'infection et à la prévention d'infections comme par ex. contre le Clostridium difficile.

### Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
<b>Bactéries</b> <i>Conformément à la VAH</i>	prêtes à l'emploi	5 min
<b>Bactéries</b> EN13727 <i>- en conditions de saleté</i>	prêtes à l'emploi	30 sec
<b>Bactéries</b> <i>Selon les recommandations VAH temps de contact court - en conditions de saleté</i>	prêtes à l'emploi	1 min
<b>Bacille de la Tuberculose</b> EN14348	prêtes à l'emploi	15 min
<b>Levure</b> <i>Conformément à la VAH - en conditions de saleté</i>	prêtes à l'emploi	5 min
<b>Levure</b> <i>Selon les recommandations VAH temps de contact court - en conditions de saleté</i>	prêtes à l'emploi	1 min
<b>Fongique</b> EN13624	prêtes à l'emploi	2 min
<b>Virus</b> EN14476	prêtes à l'emploi	15 min
<b>norovirus</b> <i>- en conditions de saleté</i>	prêtes à l'emploi	1 min
<b>Spores de bactéries</b> EN14347	prêtes à l'emploi	5 min
<b>Spores de bactéries</b> EN13704	prêtes à l'emploi	15 min
<b>Clostridium difficile</b> <i>- en conditions de propreté</i>	prêtes à l'emploi	5 min

### Certificats

- IHO listed
- VAH certificate



## Données relatives au produit

### Composition:

100 g de solution contiennent les composants actifs suivants:  
0,06 % d'acide peracétique  
autres substances: peroxyde d'hydrogène, acide acétique

### Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 1,02 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C / de la solution active
pH	env. 2,2 / 20 °C / de la solution active
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	Solution hydro sur textile non-tissé
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

## Remarques particulières

### Utiliser le désinfectant avec précaution. Lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

Le port de gants de protection (par ex. en caoutchouc nitrile) est obligatoire. À conserver à l'abri de la chaleur et des rayons du soleil. Les lingettes mikrozid<sup>®</sup> PAA ne sont pas adaptées pour les surfaces en laiton et en cuivre, ni pour les surfaces chromées. Les mentions du fabricant relatives aux surfaces à traiter doivent être respectées et la compatibilité des matériaux doit être vérifiée avant utilisation.

BAG-RegNr.: CHZN3512

### notes d'application

Porter des gants de protection (z. B. de caoutchouc nitrile) est absolument nécessaire. Essuyez la surface avec un chiffon imbibé soigneusement et laisser. Faites attention à compléter le mouillage et le maintien de la zone pendant toute la durée de travail humide. Assurez-vous que avant la désinfection pour éliminer tous les débris visibles. Lors de l'ouverture et le filetage de la première feuille sur les aspects sanitaires. Conformément à utiliser une bonne fermeture du rabat supérieur. Si nécessaire, utiliser plus de serviettes pour une utilisation sur de grandes surfaces. Ne pas utiliser sur les métaux non-ferreux et ne pas mélanger avec d'autres détergents. Schülke garantie après ouverture de l'emballage et en conformité avec les instructions d'une durée de conservation de 28 jours.

### Homologations du fabricant:

- Sondes TEE\* Philips • Têtes ultrasons\* Philips
- Sondes TEE\* Oldelft • Endoscopes Karl Storz

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
mikrozid PAA wipes -INT- 50 ST DS	10/Carton	128101

## Accessoires

Accessoires	N° art.
Wandhalterung Jumbodose	134421

## Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon des procédés avancés, fiables et respectueux de l'environnement, de manière économique et dans le respect des normes de qualité les plus strictes.

## Avis d'expert et information

Sur le site Internet [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch), vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/toute la littérature existant sur la préparation des lingettes mikrozid<sup>®</sup> PAA.

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

\*Unter Einhaltung der Herstellerangaben und -empfehlungen ist mikrozid<sup>®</sup> PAA wipes bezüglich der Materialverträglichkeit geeignet für die Aufbereitung von Ultraschallköpfen und -sonden aller führenden Hersteller (z. B. Aloka, BK Ultrasound, Fujifilm (Sonosite), GE, Hitachi, Philips, Samsung (Medison), Siemens, Toshiba). Voraussetzung ist, dass die Ultraschallköpfe und -sonden grundsätzlich mit Peressigsäure-basierten Produkten aufbereitbar sind.



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Suisse  
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)