


KURZANLEITUNG VIO® 50/100 C


 Die Kurzanleitung ist kein Ersatz für Einweisung und Gebrauchsanweisung. Die Kurzanleitung enthält keine Sicherheitshinweise. Machen Sie sich mit den Sicherheitshinweisen in den Gebrauchsanweisungen vertraut.

Notwendige Bedienschritte


1 Gerät einschalten



2 Blinkende Einstellungen mit beliebiger Taste bestätigen


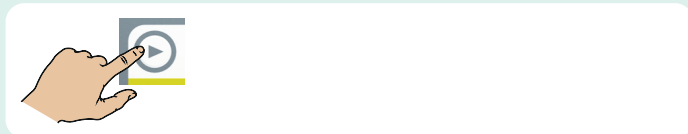


3 Bei Bedarf Programm wechseln

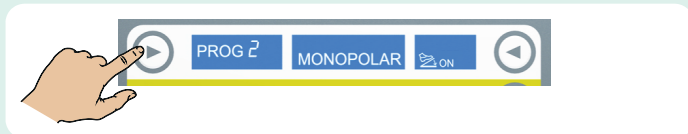


4 Einstellungen prüfen

Prüfen Sie die Einstellungen der verwendeten Instrumentenbuchsen, indem Sie nacheinander deren Fokus-Tasten drücken.

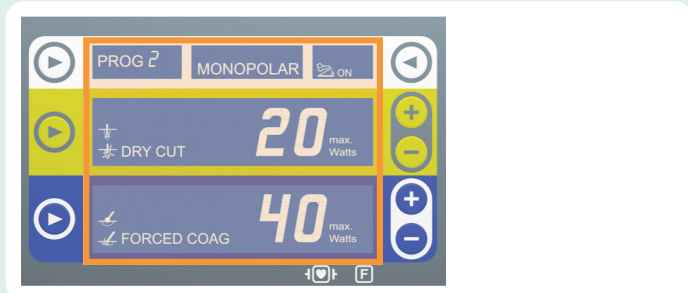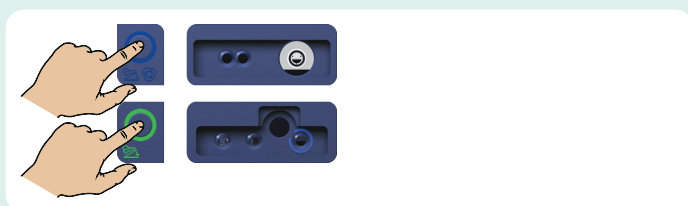

5 Neutralelektrode applizieren und anschließen

Nur wenn Sie ein monopolares Instrument einsetzen.

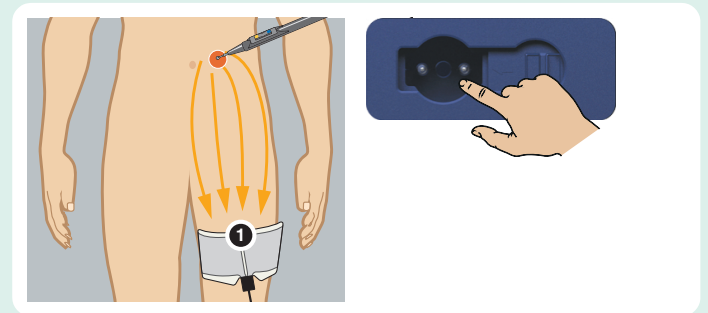

Die lange Kante der Neutralelektrode (1) muss zum OP-Feld zeigen.

6 Neutralelektrode überwachen


Nach dem Applizieren und während der OP.



Prüfen Sie bei rotem Neutralelektroden-Symbol:

- Neutralelektrode korrekt mit dem Gerät verbunden?
- Lange Kante der Neutralelektrode zeigt zum OP-Feld?
- Neutralelektrode hat genügend Kontakt zur Haut?


7 Instrumente anschließen

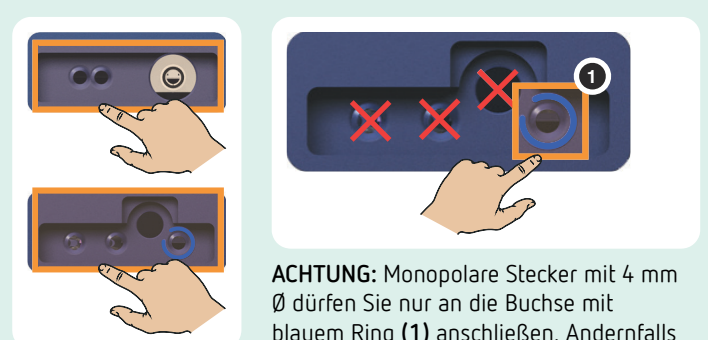


ACHTUNG: Monopolare Stecker mit 4 mm Ø dürfen Sie nur an die Buchse mit blauem Ring (1) anschließen. Andernfalls beschädigen Sie das Gerät.

Optionale Bedienschritte

8 Mode ändern

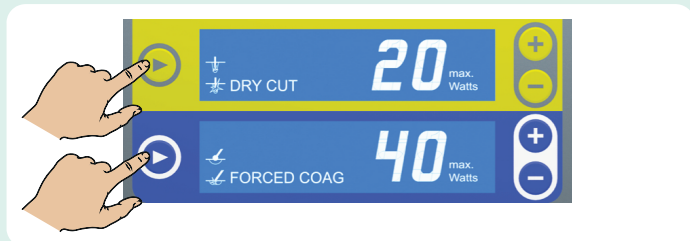


9 Leistungsbegrenzung ändern

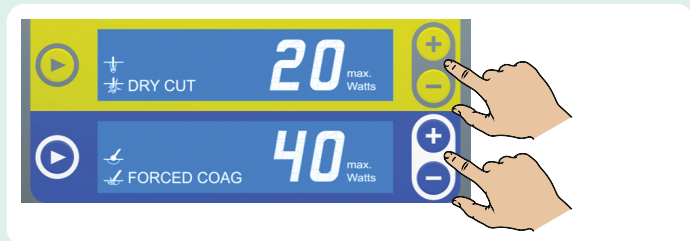

10 Buchse wählen (z.B. bipolare Buchse)



11 Der gewählten Buchse Fußschalter oder AUTO START zuweisen

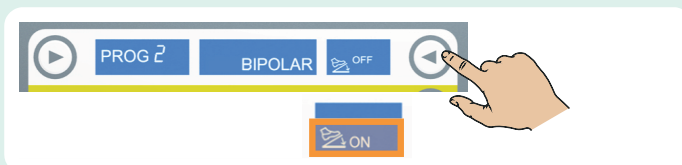

Nur VIO 100 C, bipolare Buchse: Durch erneutes Drücken der rechten oberen Taste können Sie der Buchse AUTO START zuweisen:

