



## DREI SCHRITTE ZUR BLUTENTNAHME

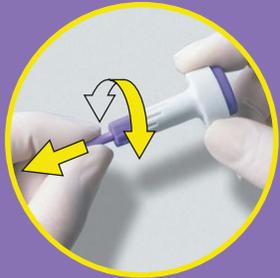

**1.**  
Schutzkappe  
drehen und  
abziehen

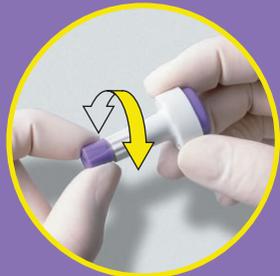

**2.**  
Punktionstiefe  
einstellen



**3.**  
Stechhilfe ansetzen  
und mit Daumen  
Punktion auslösen

## PROFESSIONELLE EINMAL-STECHHILFEN MIT SAFE-T-TECHNOLOGIE

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus Einmal-  
Stechhilfen stehen in der praktischen  
**200 Stück Spenderbox** inkl. Standard-  
öffnung an der Vorderseite zur Verfügung.



### INFORMATIONEN ZUM PRODUKT:



**Diabeteshotline:** 01/277 27-355



**Im Internet:** [www.accu-chek.at](http://www.accu-chek.at)

## HYGIENISCH, EINFACH UND VIELSEITIG



DIE VIELSEITIGE  
**EINMAL-STECHHILFE**  
FÜR DEN PROFESSIONELLEN  
GEBRAUCH



## HYGIENISCH & EINFACH MIT SAFE-T-TECHNOLOGIE

Für die professionelle Blutgewinnung in Klinik und Praxis sind vor allem zwei Aspekte entscheidend:

- **HYGIENE**
- **EINFACHE HANDHABUNG**

### DIE ACCU-CHEK SAFE-T-PRO PLUS EINMAL-STECHHILFEN


erfüllen einerseits die hohen Anforderungen im Bereich der Hygiene und ermöglichen andererseits eine einfache, intuitive Handhabung in wenigen Schritten.

- Schutzkappe für eine sterile Lanzette
- Aktivierung mittels Druckknopf verhindert versehentliches Auslösen
- Keine Verletzungsgefahr nach Gebrauch
- Wiederverwendung der Lanzette nicht möglich
- Spezieller 3-seitiger Lanzetten-Schliff für sanfte Blutgewinnung



## DIE VIELSEITIGE EINMAL-STECHHILFE MIT 3 PUNKTIONSTIEFEN

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus ist mit den **3 wählbaren Punktionstiefen** für unterschiedlichste Patientengruppen geeignet (auch im Neonatologie Bereich).

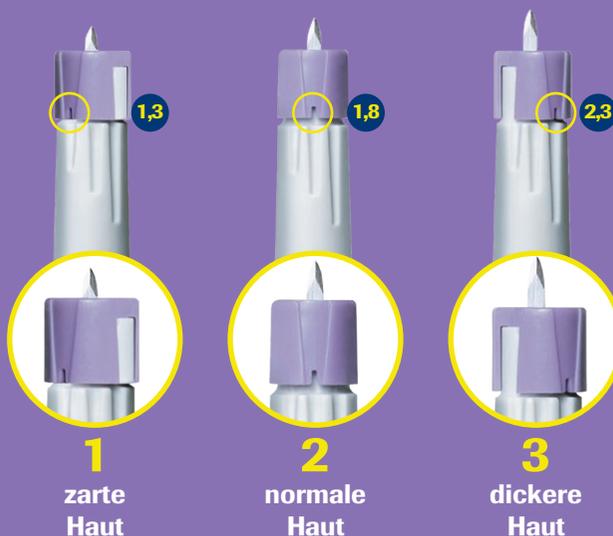


- 1** Geringe Punktionstiefe: 1,3 mm
- 2** Mittlere Punktionstiefe: 1,8 mm
- 3** Hohe Punktionstiefe: 2,3 mm

### VORBEREITUNG:

Hände nach Bedarf anwärmen. Reinigen Sie die Punktionsstelle entsprechend Ihrer Vorschriften. Zur Kapillarblutentnahme sind die Seiten der Fingerkuppe am besten geeignet.

## EINFACHE BEDIENUNG DURCH ERGONOMISCHE T-FORM

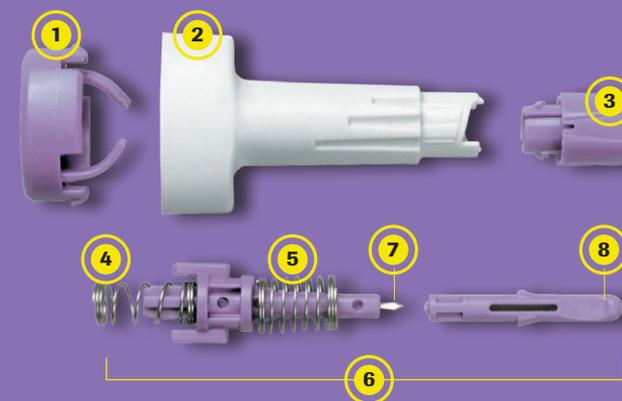

- 1** Auslöseknopf
- 2** T-Form Gehäuse
- 3** Punktionstiefeneinstellung
- 4** Antriebsfeder
- 5** Rückziehfeder
- 6** Lanzette
- 7** Nadel
- 8** Schutzkappe



### NACHBEHANDLUNG:

Die Fingerkuppe mit einem sauberen Tuch reinigen und nach Bedarf ein Wundpflaster auflegen.