



# TECHNISCHES DATENBLATT

## JONHY WEE - UNISEX PINKELBEUTEL

JW021

**Technisches Datenblatt: Jonhy Wee Unisex Pinkelbeutel / Notfalltoilette (JW021)**

**31.01.2024**

### Produktbeschreibung

Jeder kennt die Situation. Du bist unterwegs, die Blase drückt und Du musst dringend pinkeln. Das Problem: Es ist keine Toilette in der Nähe oder die nächste öffentliche Toilette ist unhygienisch.

Genau für diese Situationen gibt es Jonhy Wee Pinkelbeutel - eine kleine praktische Notfalltoilette für Frauen, Männer und Kinder unterwegs. Das aus recycelten Materialien hergestellte Taschen-WC, ist ideal für jedes Auto, Reisen mit den Kindern, Stau, Camping und Zelten, Outdoor-Aktivitäten, Festivals, sowie für den Alltag (schwängere Frauen, Rollstuhlfahrer, leichte Blasenschwäche).

Urin wandelt sich dabei innerhalb von Sekunden zu festem Gel. 100% hygienisch – Gerüche und Bakterien werden dabei gebunden. Die Haut des Benutzers berührt dabei den Kunststoff-Adapter nur kurzzeitig. Der Zipper Verschluss macht die Beutel auslaufsicher und man kann Jonhy Wee mehrmals nutzen bis das Volumen von 600ml erreicht ist.

Die Beutel sind klein (nur 34g) und kompakt, überall verstaubar für jede Hosens- und Handtasche, Handschuhfach oder Rucksack für den nächsten Ausflug. Dank des geschlechterfreundlichen Adapters, können auch Frauen sicher im Stehen pinkeln.

### Top Features

- **Unisex** - Für alle Geschlechter
- **Praktisch & klein** - Überall verstaubar
- **Hygienisch** - Bakterien- und geruchsfrei
- **Auslaufsicher** - Zipper-Verschluss
- **Mehrfach nutzbar** - Bis 600ml
- **Aus recycelten Materialien**

**URIN WIRD  
IN SEKUNDEN  
ZU 100% GEL**

- ✓ **Praktisch & klein**  
überall verstaubar
- ✓ **Hygienisch**  
Bakterien- und geruchsfrei
- ✓ **Auslaufsicher**
- ✓ **Mehrfach nutzbar**  
Bis 600ml
- ♻️ **Aus recycelten Materialien**



**JONHY WEE GMBH & CO. KG** · ZUR GRAFENMÜHLE 147 · 46244 BOTTROP, GERMANY  
GESCHÄFTSFÜHRER: GEORGE STROHMAIER, ROBERT LERCH · INFO@JONHYWEE.COM

TEL: +49 (0)221 957945 21 · MOB: +49 157 3957 2240 · AMTSGERICHT GELSENKIRCHEN · HRA 5232 (GMBH & CO. KG)  
HRA12872 (MBH) · UST-IDNR. DE 301 378 920 ·



# TECHNISCHES DATENBLATT

## JONHY WEE - UNISEX PINKELBEUTEL

JW021

### Info

Name:	Jonhy Wee Unisex Pinkelbeutel / Notfalltoilette
Einheit:	3 Stk x 600ml (Pack)
SKU:	JW021
GTIN/EAN:	4260255588111
PZN:	16924261
Zolltarifnummer (HS-Code)	39232990000

### Maße/Gewicht

Nettofüllmenge:	600ml
Beutel Maße (auseinandergefaltet):	30,0cm x 10,6cm
Verpackung Maße:	11,5cm x 4,5cm x 12,0cm (+2,5 cm Euroloch-Aufhängung)
Nettogewicht Beutel:	34 g
Nettogewicht Verpackung:	22 g
Bruttogewicht inkl. Verpackung:	124 g

### Material

Material Adapter:	rHDPE
Material Beutel:	rLDPE
	Recycelte Kunststoffe - Global Recycled Standard (GRS)
Material Superabsorber (SAP):	Superabsorberpolymer (BASF)
Material Hülle für SAP:	Polyvinylalkohol - PVA (auflösend)
Material Verpackung:	Elfenbeinkarton - FSC®-zertifiziert
Farbe Beutel:	Grün, weiß
Mindesthaltbarkeit:	Kein Ablaufdatum

### URIN WIRD IN SEKUNDEN ZU 100% GEL

- ✓ **Praktisch & klein**  
überall verstaubar
- ✓ **Hygienisch**  
Bakterien- und geruchsfrei
- ✓ **Auslaufsicher**
- ✓ **Mehrfach nutzbar**  
Bis 600ml
- ♻️ **Aus recycelten Materialien**





# TECHNISCHES DATENBLATT

## JONHY WEE - UNISEX PINKELBEUTEL

JW021

### Anwendung

#### 1. Adapter ansetzen

- weibliche Nutzer drücken den Adapter fest unten an
- männliche Nutzer halten Ihr Glied über den Adapter

#### 2. In den Adapter pinkeln

#### 3. Warten bis Urin sich in Sekunden zu Gel wandelt

#### 4. Beutel schließen

#### 5. Beutel im Restmüll entsorgen (siehe Entsorgungsoptionen)

### Entsorgungsoptionen

Beutel im Restmüll entsorgen

Optional: Beutel-Inhalt in den Restmüll, Beutel in der gelben Tonne recyceln



### SO EINFACH GEHT'S

#### PINKELN IN VERSCHIEDENEN POSITIONEN



### Warnhinweise

Absorber nicht schlucken

Produkt nicht während der Fahrt am Steuer benutzen

Nutzung für Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen

### Zweckbestimmung

Jonhy Wee ist ein Unisex Hygieneprodukt als mobiles Urinal zur Sammlung von Urin

### Rechtliche und regulatorische Hinweise

REACH - Verordnung (EG) 1907/2006 (SVHC):

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:

Richtlinie 2001/95/EG allgemeine Produktsicherheit:

Geltungsbereich der DE-UZ 208:

TÜV-Rheinland (01/2024)

Keine besonderen Gefahren bekannt

Product-IP (01/2024)

Nicht zutreffend

Ort: Köln, DE

Datum: 31.01.2024

Unterschrift:

**JONHY WEE GMBH & CO. KG**  
Zur Grafenmühle 147  
46244 Bottrop (Germany)  
Tel: +49 157 3957 2240