

Fixierung arterieller Kanülen

OPSITE® IV3000 Einhand-Applikation (6 cm x 7 cm) und OPSITE® IV3000 port (7 cm x 9 cm)



1. Feste und sichere Fixierung arterieller Kanülen mit Hilfe von 2 Folien übereinander.



2. Von der ersten Folie OPSITE® IV3000 Einhand-Applikation Schutzpapier (1) und (2) abziehen.



3. Erste Folie unter die Kanüle bis zur Punktionsstelle kleben. Schutzpapier (3) abziehen.



4. Zweite Folie OPSITE® IV3000 port verwenden.



5. Zweite Folie nach Entfernen des Schutzpapiers (1) und (2) mit deren Ausstanzung bis an die Kanüle heranschieben, Trägerfolie (3) abziehen.



6. Gut anmodellieren.

* Warenzeichen von Smith & Nephew