

Sension GmbH
Provinstr. 52 / Gebäude B14
86153 Augsburg
Telefon +49(0)821/455 799-0
Telefax +49(0)821/455 799-22
E-Mail info@sension.eu



No.01-09 Testanleitung Trockenblut/V01



Testanleitung Trockenblut



 0821/455 799-0

 info@sension.eu

1



Legen Sie die mitgeschickten Utensilien zur Blutentnahme bereit und beschriften Sie die Testkarte mit Ihrem Namen und dem Probennahmedatum

2



Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und **warmem** Wasser und regen Sie durch Kreisen des Arms die Durchblutung an

3



Desinfizieren Sie mit dem Alkoholpad den Mittel- oder Ringfinger Ihrer nicht dominanten Hand

4



Entfernen Sie die Spitze der Stechhilfe mit einer Drehbewegung

5



Setzen Sie die Stechhilfe in der Mitte der Fingerkuppe auf und drücken Sie hinten fest auf den farbigen Knopf. Die Nadel wird ausgelöst und Sie werden einen kleinen Pikser spüren

6



Der erste Blutropfen wird durch Abwischen verworfen

7



Durchtränken Sie mindestens 2 Felder vollständig bis zur gestrichelten Linie.


Auf der Rückseite muss das aufgetragene Blut gut sichtbar die gleiche Fläche umfassen.

8



Haben Sie die Felder befüllt, drücken Sie kurz mit einem trockenen Tupfer auf die Einstichstelle, um die Blutung zu stoppen

9

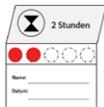

Lassen Sie die Karte 2 Std. an der Luft trocknen und geben Sie sie dann, zusammen mit dem Trockenbeutel, zurück in die kleine Plastiktüte

10



Stecken Sie diese zusammen mit dem ausgefüllten und unterschriebenen Untersuchungsauftrag in den Rücksendumschlag und **frankieren Sie diesen**, um die Probe umgehend an unser Labor schicken zu können



Gerne können Sie unsere Testanleitung auch auf Youtube (Sension GmbH) ansehen. Scannen Sie hierzu einfach den
◀ QR-Code