


geko™ device

Warnhinweise

firstkind
living science

geko™
circulation support

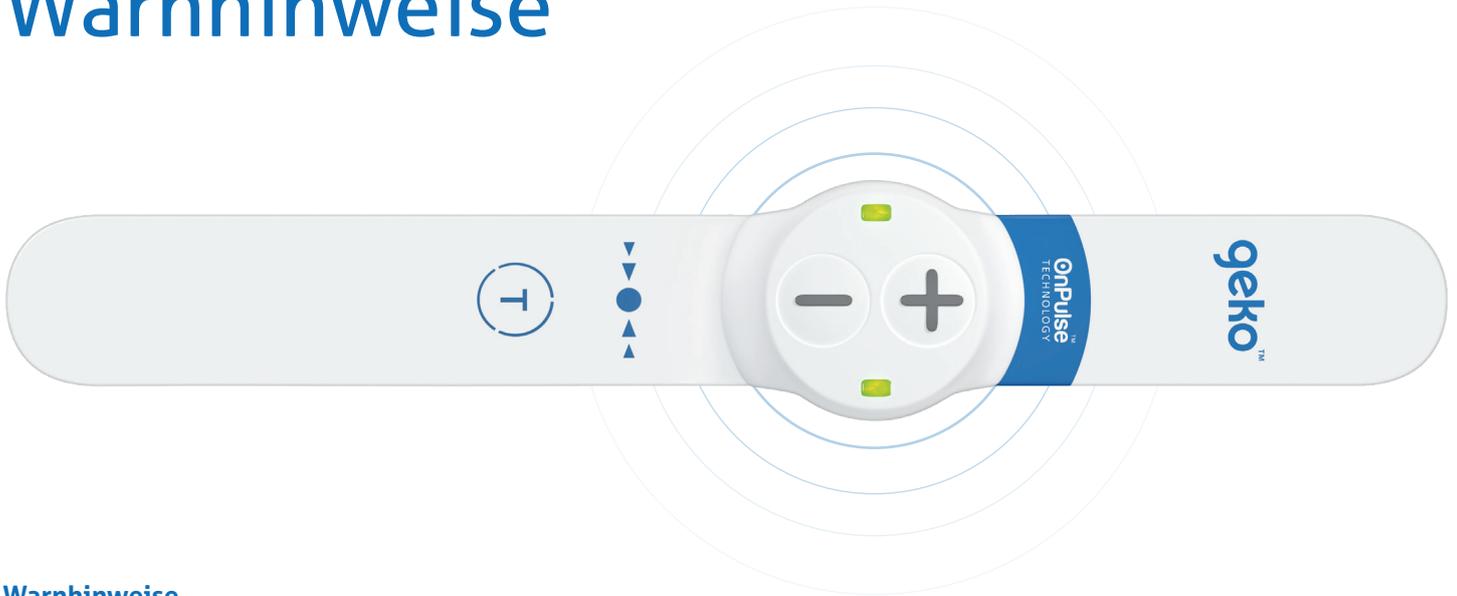

Warnhinweise

- Implantierte elektronische Geräte (zum Beispiel ein Herzschrittmacher): - bevor der Patient der Stimulation ausgesetzt wird, ist eine ärztliche Meinung einzuholen.
- Kürzlich diagnostizierte oder vermutete TVT: bevor der Patient der Stimulation ausgesetzt wird, ist eine ärztliche Meinung einzuholen.
- Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig lesen. Das Gerät anweisungsgemäß anwenden. Die unsachgemäße Anwendung dieses Geräts kann gefährlich sein.
- Das geko™-Gerät kann durch den Patienten oder Dritte bedient werden. Patienten sollten in der Positionierung und Bedienung des Gerätes geschult werden.
- Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren.
- Jedwede Änderungen am Gerät sind unzulässig.
- Nicht anwenden beim Autofahren, beim Bedienen von Maschinen oder im Rahmen einer Tätigkeit, bei der unwillkürliche Muskelkontraktionen ein übermäßiges Verletzungsrisiko für den Anwender oder für andere Personen darstellen können.
- Die Stimulation darf nicht am oder durch den Kopf, direkt auf den Augen, am Mund, an der Halsvorderseite (insbesondere Sinus caroticus) oder über Elektroden erfolgen, die an der Brust und im oberen Rückenbereich befestigt sind oder quer über das Herz verlaufen.
- Das Anbringen von Elektroden in der Nähe des Brustkorbs kann das Risiko von Herzflimmern erhöhen.
- Nicht auf schmerzenden, infizierten oder entzündeten Bereichen, verletzter Haut oder Hautausschlägen, z. B. bei Phlebitis, Thrombophlebitis, Krampfadern usw., anwenden.
- Nicht auf oder in der Nähe von kanzerösen Läsionen anwenden.
- Nicht in der Nähe (d. h. innerhalb von 1 m) von Kurzwellen-/Mikrowellengeräten anwenden, da diese das Gerät beeinträchtigen können.
- Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte können elektrische Medizinprodukte beeinträchtigen.
- Tragbare RF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht näher als mit 30 cm (12 Zoll) Abstand zu jedem Teil des geko-Geräts verwendet werden. Andernfalls kann es bei diesem Gerät zu Leistungseinbußen kommen.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung bereits geöffnet ist oder beschädigt aussieht.
- Kein Gerät verwenden, das offensichtlich beschädigt ist.
- Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen verwenden, z. B. offene Flammen oder Heizstrahler, da die Leistung des Geräts durch übermäßige Wärmeeinwirkung beeinträchtigt werden kann.
- In einigen Fällen können an der Kontaktfläche Hautentzündungen oder Hautirritationen auftreten:
 - das Gerät entweder entfernen oder an der alternativen Befestigungsposition anlegen.
- Bei anhaltenden oder erneut auftretenden Beschwerden ist ein ärztlicher Rat einzuholen, bevor die Anwendung fortgesetzt wird.
- Das Hydrogel enthält Acrylpolymer. Nicht bei Patienten mit bekannter Allergie gegen Acrylsäure anwenden.
- Ärztlicher Rat ist einzuholen bei einer Schwangerschaft einer Patientin, bei Diagnose einer Herzerkrankung oder Epilepsie
 - oder nach einer Operation, bei der Muskelkontraktionen den Heilungsprozess stören können.
- Da das Gerät ferromagnetische Komponenten enthält, sollte es entfernt werden, bevor sich der Patient einer MRT unterzieht.
- Das Gerät muss während einer EKG-Untersuchung mit Beinelektroden abgeschaltet werden, da es die EKG-Signale der Beinelektroden beeinträchtigen kann.
- Das Gerät ist nicht für die Nutzung in einer sauerstoffreichen Umgebung vorgesehen.
- Das Gerät nicht in den Mund stecken, es besteht Erstickungsgefahr. Zudem kann das Gerät potentiell allergische Reaktionen hervorrufen. Wenn das Gerät oder eine Komponente verschluckt wird, SOFORT einen Arzt aufsuchen. Das Verschlucken der Batterie kann schwerwiegende Schäden verursachen.
- Die ordnungsgemäße Funktion des Geräts alle 2 Stunden überprüfen.
- Das Gerät nur anweisungsgemäß verwenden. Weitere Empfehlungen und Anwendungstipps finden Sie unter www.gekodevices.com.
- Die Sicherheit des geko wurde nicht an Kindern geprüft.
- Nicht einschalten, bevor es nicht ordnungsgemäß am Patienten angelegt wurde.
- Das Gerät muss sauber und trocken gehalten werden. Nicht mit angelegtem Gerät baden oder duschen.
- Kein Gerät anlegen, das bereits von einer anderen Person getragen wurde. Dies stellt eine Infektionsgefahr dar.
- Bevor die Geräte länger als 28 aufeinanderfolgende Tage verwendet werden, ist eine ärztliche Meinung einzuholen.
- Das Gerät vorsichtig entfernen, dabei das lange Ende zuerst anheben und mit gleichmäßigem Kraftaufwand behutsam abziehen.
- Übermäßiger Kraftaufwand kann das Gerät beschädigen.

Dieses Dokument nicht anstelle der Gebrauchsanweisung an Patienten geben. Diese Warn- und Sicherheitshinweise dienen AUSSCHLIEßLICH Informationszwecken.



Weitere Informationen in der Gebrauchsanweisung.



Firstkind Ltd, Hawk House, Peregrine Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire, HP13 7DL, Vereinigtes Königreich.



0120

