

DIE HÖHLE DER
LÖWEN

BEKANT AUS DER




GRÜNDER-SHOW



Der Triggerknopf

Schmerzlinderung auf den Punkt

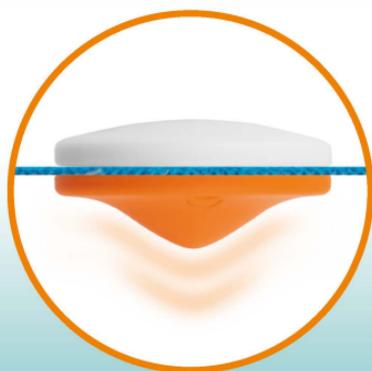

Anleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass du dich für **TRIGGIN – der Triggerknopf** entschieden hast. Er wird mithilfe von Tape oder Bandagen auf einen Triggerpunkt gesetzt und sorgt durch den punktuellen Druck für einen positiven Effekt bei alltäglicher Mobilität.

Lies vor dem ersten Gebrauch des Produktes die Anleitung und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Produktes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in der Anleitung nicht beachtet werden.

Solltest du Fragen zum Lieferumfang haben, kontaktiere den Kundenservice über unsere Website:

www.ds-group.de/kundenservice

Bei Fragen zur Anwendung des Produktes oder sonstigen medizinischen Fragen wende dich an therapeutisches oder fachärztliches Personal.



LIEFERUMFANG

1 x Triggerknopf (zweiteilig)

1 x Tape (bei Artikel 1922 nicht enthalten)

1 x Anleitung

Überprüfe den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist, sondern kontaktiere den Kundenservice.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

- Das Produkt ist nur zur äußeren Anwendung geeignet.
- **Nicht bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren anwenden!**
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Produkt nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

INDIKATIONEN

- Das Produkt wird bei lateralem Ellenbogenschmerz, lateralem Schienbeinkantensyndrom oder Muskelverspannungen im Schulter-Nacken-Bereich eingesetzt.

KONTRAINDIKATIONEN

- Das Produkt nicht verwenden, wenn in der Vergangenheit durch die Anwendung von Tapes Hautreizungen, Juckreiz, Hautrötungen oder andere Nebenwirkungen aufgetreten sind.
- Falls beim Gebrauch des Produktes Schmerzen, Hautirritationen, allergische Reaktionen oder andere Nebenwirkungen auftreten, das Produkt sofort von der Haut entfernen! Sollten die Symptome nicht nachlassen, fachärztliches Personal aufsuchen.
- Nur auf gesunder Haut anwenden.
- Nicht auf Knochenkanten, Schleimhäuten, gefühllosen Körperstellen, im Intimbereich, am Kopf und vorderen Halsbereich, insbesondere in der Nähe der Schilddrüsen, anwenden.
- Bei Diabetes oder sonstigen Krankheiten oder Gebrechen vor der Anwendung fachärztliches Personal konsultieren.

- Die Anwendung während einer Schwangerschaft nur nach Rücksprache mit dem/r behandelnden Arzt/Ärztin.
- Bei verminderter Blutgerinnung (Hämophilie) oder Einnahme blutverdünnender Medikamente ist besondere Vorsicht geboten. In diesem Fall ist fachärztliches Personal zu Rate zu ziehen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verpackungsmaterial und Produkt von Babys, Kleinkindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr durch Kleinteile und Plastikfolien!
- Das Tape nicht zirkulär (ringsherum um einen Körperteil) oder mit zu hoher Spannung anlegen, um Blutstau oder Verletzungen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht an bewusstlosen Personen anwenden.
- Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren und sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Falsche Benutzung kann zu Verletzungen führen.
- Den Triggerknopf vor der Erstanwendung und dann nach jeder Anwendung reinigen, um Hautinfektionen o. ä. durch Rückstände am Triggerknopf zu vermeiden.
- Das Produkt vor Feuer schützen und nicht auf Heizkörper oder andere Wärmequellen legen.
- Das Produkt nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.

ANWENDUNG




Benutze **TRIGGin – der Triggerknopf** ausschließlich mit dem zugehörigen Tape. Dieses kannst du online über unsere Website www.triggin.de nachbestellen.


Damit das Tape gut haftet, sollte die Haut sauber, trocken sowie frei von Fett und/oder ÖL sein. Starke Behaarung sollte vor der Verwendung des Tapes entfernt werden.



Den Schmerzpunkt im Schulter-Nacken-Bereich, am Schienbein oder Arm lokalisieren.

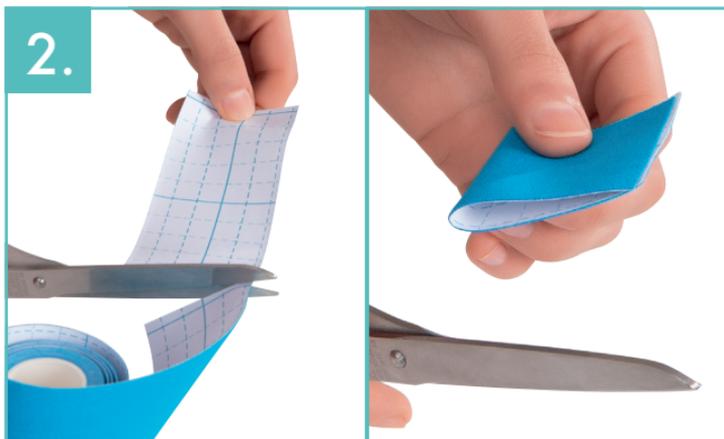


Ein ca. 12 cm langes Stück Tape abtrennen und in der Mitte knicken.

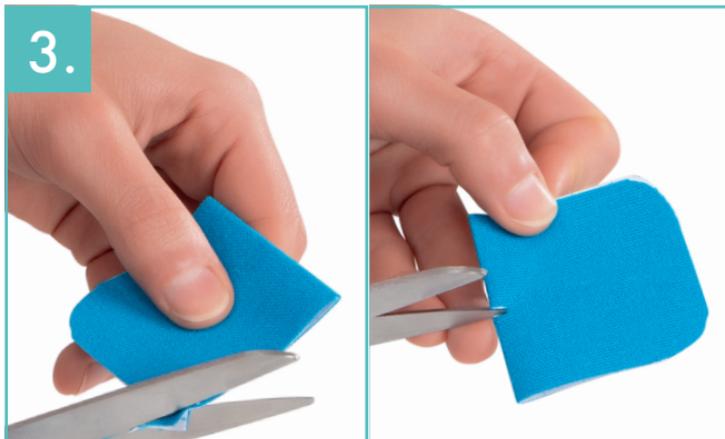

Tape an den Ecken abrunden und mittig einschneiden, sodass ein kleines Loch entsteht.



Das flache Oberteil des Triggerknopfes vom kegelförmigen Unterteil lösen.

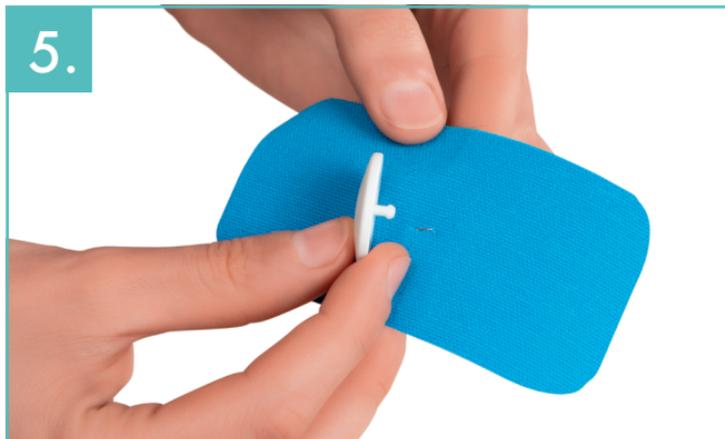

Das Tape aufklappen und den Pin des Oberteils von oben durch das Loch im Tape stecken.



Auf der Unterseite des Tapes das Unterteil auf den Pin klicken.



Das Tape in der Mitte auseinanderziehen, bis die Schutzfolie reißt.
Dann die Schutzfolie ein Stück abziehen.



Den Triggerknopf direkt auf dem Schmerzpunkt platzieren und das
Tape mit Dehnung in der Mitte anbringen.



Die Tape-Enden ohne Dehnung aufkleben, dabei die Klebeflächen möglichst nicht berühren.



Ein weiteres Tape darüber kleben, um den Druck auf den Triggerpunkt zu erhöhen und ihn zu fixieren.

Nach dem Aufkleben mehrmals mit der Hand über das Tape streichen, um den Kleber zu aktivieren und einen guten Halt zu erzielen.



Während der Tragedauer nur moderate Bewegungen und Belastungen ausüben und sich keiner Wärmebehandlung unterziehen, um z. B. der Bildung von Spannungsblasen durch Schweiß unter dem Triggerknopf vorzubeugen.

Den Triggerknopf nach ca. 12 Stunden, bei guter Verträglichkeit nach maximal 24 Stunden, abnehmen. Dazu das Tape in Haarwuchsrichtung abziehen. Den Triggerknopf nach jeder Anwendung gründlich reinigen (siehe folgende Seite).

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Den Triggerknopf mit warmem Seifenwasser reinigen und mit klarem Wasser abspülen. Bei Bedarf ein Desinfektionsmittel benutzen. **Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.**
- Den Triggerknopf vor dem Verstauen mit einem Tuch abtrocknen oder an der Luft trocknen lassen.
- Bei Zimmertemperatur (zwischen 4 und 25 °C) und vor Sonnenlicht geschützt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

SYMBOLERKLÄRUNG



Anleitung vor Gebrauch lesen!



Hersteller nach (EU) 2017/745



Chargencode



CE-Konformität gemäß der europäischen Verordnung (EU) 2017/745

PRODUKTDATEN

Artikelnummer:	01910 (blaues Tape) 01912 (pinkes Tape) 01922 (ohne Tape)
Klassifizierung:	Medizinprodukt der Klasse I
Material Triggerknopf:	Flache Hälfte: ABS; Kegel: TPE
PZN:	18160023 / 18160046 / 18196943
UDI-DI:	4004128007664 / 4004128030310 / 4004128030358



ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen
und der Wertstoffsammlung zuführen.

WEITERE INFORMATIONEN

Kundenservice / Vertrieb
DS Produkte GmbH
Am Heisterbusch 1
19258 Gallin / Deutschland
Tel.: +49 38851 314650 *

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif
deines Anbieters.

Hergestellt für
ProCure med GmbH
Otto-Hahn-Straße 56
63456 Hanau / Deutschland

Hersteller / EU-Repräsentant nach (EU)
2017/745
Hydas GmbH & Co. KG
Hirzenhainer Straße 3
60435 Frankfurt / Deutschland
www.hydas.de

Alle Rechte vorbehalten.
ID Gebrauchsanleitung:
Z 01910_01912 M DS V1 0622

