

Une procédure simple à suivre pour les professionnels formés\*

# Test antigénique rapide CLINITEST® COVID-19


[siemens-healthineers.com/fr](https://www.siemens-healthineers.com/fr)



Ne pas utiliser le test après la date de péremption.

Les matériaux utilisés doivent être jetés en tant que déchets contaminés conformément aux réglementations locales. Ramener l'échantillon et les composants du test à température ambiante si nécessaire (15–30 °C) et utiliser l'équipement de protection individuelle approprié.

1

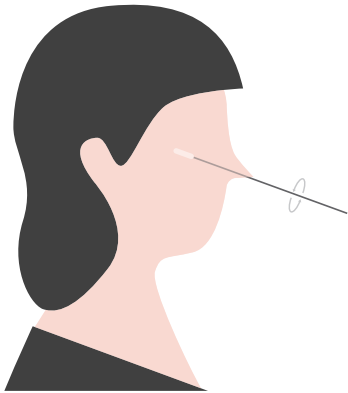


Insérer soigneusement l'écouvillon nasopharyngé dans la narine du patient, faire doucement tourner l'écouvillon plusieurs fois sur la surface du nasopharynx postérieur et le retirer doucement.

2



Maintenir le flacon de tampon à la verticale et ajouter 10 gouttes (~ 300 µl) de tampon dans le tube d'extraction posé sur le portoir fourni.

3

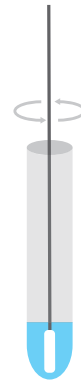


Faire rouler l'écouvillon au moins 6 fois tout en pressant la tête contre le fond et le bord du tube d'extraction. Laisser reposer 1 minute et presser plusieurs fois.

4



Retirer et jeter l'écouvillon en toute sécurité et insérer l'embout compte-gouttes dans le tube contenant l'échantillon.

5

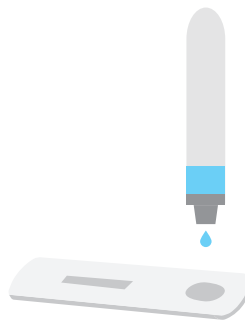

Poser la cassette à plat et ajouter quatre gouttes (~ 100 µl) de l'échantillon à tester dans le puits d'échantillon prévu à cet effet. Lire les résultats au bout de 15 minutes.

## Lecture des résultats



Positif



Négatif



Non validé

\*Ces indications ne se substituent pas à celles de la notice d'utilisation dont les termes prévalent.

La liste des professionnels autorisés est fixée par l'arrêté du 16 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.

En France, conformément à l'arrêté du 16 octobre 2020 et après vérification par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des documents qui leur ont été transmis, le dispositif CLINITEST® COVID-19 est inscrit sur la liste publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé : <https://covid-19.sante.gouv.fr/tests>. Fabricant : Healgen Scientific Limited Liability Company, 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA

Mandataire : Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe), Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Allemagne Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation du test.

---

Siemens Healthineers Headquarters  
Siemens Healthcare GmbH  
Henkestr. 127  
91052 Erlangen  
Allemagne

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.  
Point of Care Diagnostics  
2 Edgewater Drive  
Norwood, MA 02062-4637  
USA

Siemens Healthineers  
40 avenue des fruitiers  
93200 Saint-Denis