



Uitstekende prestaties en nauwkeurigheid



Één van de meest nauwkeurige meters op de markt.

Eenvoudig aanbrengen van bloed



Een kleine druppel bloed aanbrengen op de volledige breedte van de strip.

SmartPack verpakking




SmartPack verpakking die verspilling van teststrips tegengaat.

Strip ejector



Strip ejector voor hygiënische verwijdering van de teststrips.

Metten in het donker

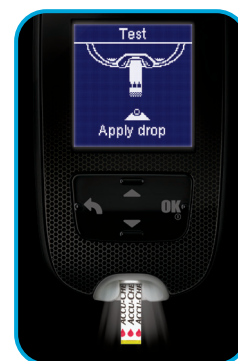

Helder, lichtgevend scherm en verlichte teststrippoort.

97% van de gebruikers vinden de Accu-Chek Guide zeer eenvoudig in gebruik.



91% van de gebruikers vinden het nemen van strips uit de SmartPack verpakking gemakkelijker dan uit een normale verpakking.






Was de handen met warm water en zeep, en droog ze goed af.



Controleer de vervaldatum op de flacon teststrips. Gebruik geen vervallen teststrips.



Druk de teststrip naar boven, oefen een beetje druk uit met de duim en neem de teststrip uit de flacon. Sluit daarna voorzichtig het deksel.

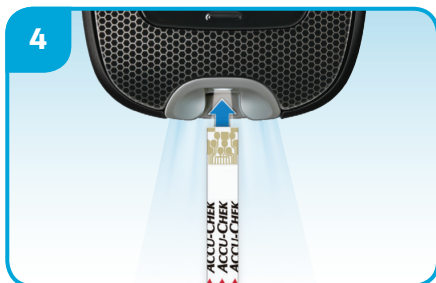


Voer de teststrip in de meter in de richting van de pijl. De meter start automatisch. Een knipperend druppelsymbool wordt op het scherm weergegeven. Voer nu een vingerprik uit.



Houd de gele applicatiezone van de teststrip tegen de bloeddruppel. Haal de vinger van de teststrip weg als het knipperende zandlopersymbool op het scherm wordt weergegeven. Breng geen bloed aan op de bovenkant van de teststrip.



Het bloedglucoseresultaat verschijnt na ongeveer 4 sec. op het scherm. Indien je een markering wenst toe te voegen aan deze waarde, druk dan op de knop OK. Indien je geen markering wenst toe te voegen, ga dan onmiddellijk naar stap 8.

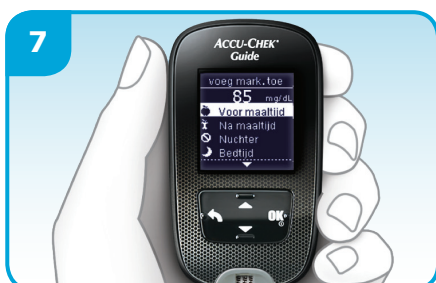

Druk op de knop ▼ om de gewenste markering te selecteren. Druk op de knop OK om te bevestigen dat de markering betrekking heeft op het gemeten bloedglucoseresultaat.



Druk op de knop aan de zijkant van de meter om de teststrip te verwijderen. Druk gedurende 3 sec. op de knop OK om de meter uit te zetten of wacht 15 sec. en de meter gaat automatisch uit.

AMPP - 10/2021

¹ Jendrike N. et al. Pain sensation at Fingertips and Palm by using different Blood Glucose Monitoring Systems. Diabetes Technology Meeting. San Francisco, 5-7 November 2009.

² binnen ± 10 mg/dL van de referentiewaarden voor bloedglucosewaarden < 100 mg/dL en binnen $\pm 10\%$ van de referentiewaarden voor bloedglucosewaarden > 100 mg/dL

³ Roche Diabetes Care, Inc., Data on file, 2016

⁴ Studie gedaan in 2015 (N-197 PwD) in de US en Frankrijk voor Abbott, Accu-Chek, Bayer en LifeScan meters. Roche, data on file.

Website
hcp.accu-check.be

E-mail
info@accu-check.be

Accu-Chek Service
0800 93 626

Registreer je product
www.accu-check.be/registreer

Facebook
www.facebook.com/RocheDiabetesCareBE

Webshop
www.mydiabetescare.be

Verbindt met mySugr

ACCUCHEK, ACCUCHEK GUIDE, FASTCLIX en MYSUGR zijn handelsmerken van Roche. © 2021 Roche Diagnostics Belgium
Roche Diagnostics Belgium NV/SA | Greenhouse BXL | Berkenlaan 8A, 1831 Diegem