



## Gerät einschalten


Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie entweder die rote oder blaue Pfeiltaste   drücken.

Wenn Sie das easyTymp in der Ladestation aufbewahren, schaltet es sich automatisch ein, sobald Sie das Gerät aus der Ladestation nehmen.



## Anwendung der Ohrstöpsel

Wählen Sie einen passenden Ohrstöpsel, abhängig von Größe und Form des Gehörgangs, aus. Stecken Sie den Ohrstöpsel sorgfältig auf die Sondenspitze.

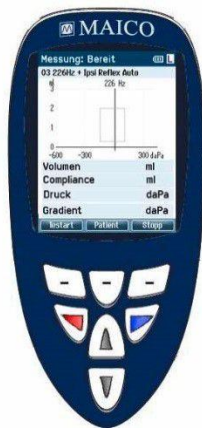
## Bedientasten



Obere Tastenreihe: Die Funktion der Tasten wird im Display, oberhalb der entsprechenden Taste angezeigt (z. B. Testart, Patient, Stopp).

  Pfeiltasten: Zum Einschalten des easyTymp die rote oder blaue Pfeiltaste drücken.

Zum Ausschalten beide Pfeiltasten gleichzeitig drücken.

  Auf- und Ab-Tasten: Zum Auf- und Ab-Blättern durch die easyTymp Einstellungen, Testprotokolle und Display

### Test starten


Das easyTymp startet mit der Anzeige Messung: Bereit, im selben Testprotokoll wie im letzten Test. Das verwendete Testprotokoll wird in der zweiten Zeile des Testscreens angezeigt.

### 03 Tymp 226Hz + Auto Reflex

Führen Sie die Sondenspitze mit Ohrstöpsel soweit in den Gehörgang ein, dass dieser luftdicht verschlossen ist. Das gewählte Testprotokoll wird automatisch gestartet.

Weitere Funktionen:


 **Testart** Öffnet die Anzeige der verfügbaren Testprotokolle.

 **Patient** Nur aktiv, wenn im Menü die Patientenverwaltung aktiviert wurde. Über diese Funktion können Sie Patientendaten ansehen und verändern, vorangegangene Messungen können angesehen und/oder ausgedruckt werden.


 **Stopp** Die Stopp-Taste unterbricht den Test.

Das Ende des Tests wird mit dem Fertig! Display angezeigt.


## Display

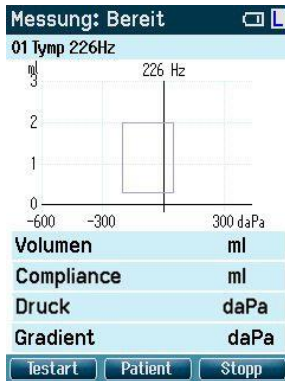

Wählen Sie Testart um ein anderes Testprotokoll zu verwenden.  
 Wählen Sie Patient, um in die Patientenliste zu gelangen.

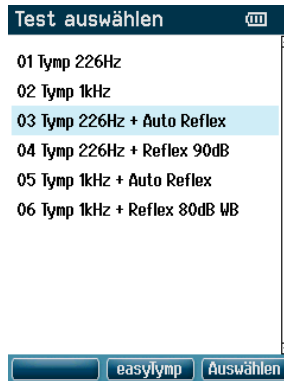


Gehen Sie nach oben bzw. unten, um einen Test auszuwählen. Starten Sie die Messung über Auswählen.

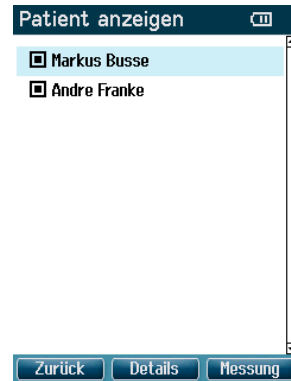


Gehen Sie nach oben bzw. unten, um einen Patienten auszuwählen.  
 Wählen Sie Details, um sich die gespeicherten Details anzusehen.

## Messung verwalten

Nach Beendigung des Tests geht das easyTymp automatisch zur Anzeige "Fertig!".

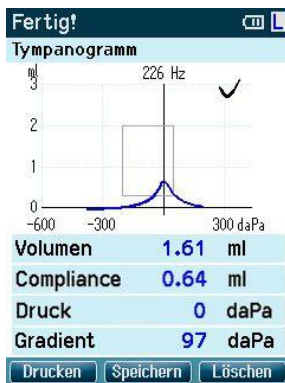

Mit den Auf- und Ab-Tasten können Sie durch die Ergebnisse dieser Messung blättern.

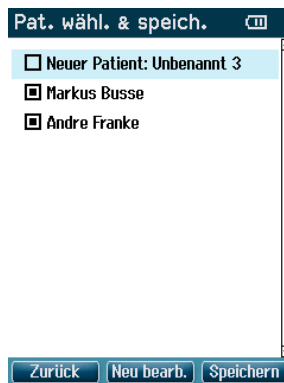

Hier können Sie Daten für einen bereits angelegten Patienten speichern oder einen neuen Patienten anlegen.



Die Auf- und Ab-Tasten bewegen den Auswahlcursor einen Buchstaben nach oben oder unten. Wenn Sie das Geburtsdatum bearbeiten, ändern diese Pfeiltasten den Zahlenwert entsprechend.