

# femSense®

## Zyklustracker



## Zyklustracking mit femSense – für jede Lebensphase

Seit Generationen wird die Temperaturmethode verwendet, um eine Schwangerschaft zu planen oder aber auch zu vermeiden. Auf diesem Wissen basiert femSense. femSense ist der schnellste Weg des Fruchtbarkeitstrackings. Der smarte Sensorpatch misst rund um die Uhr die Körpertemperatur. Er zeigt via App die individuell fruchtbarsten Tage an und bestätigt den Eisprung. Ob Kinderwunsch oder nicht!



### FRUCHTBARKEIT TRACKEN

Verfolge deinen Zyklus und deine Fruchtbarkeit. Mit femSense weißt du immer, wie (un)fruchtbar du heute bist, und wann deine nächste Periode fällig ist.




### SCHWANGER WERDEN

Erhöhe die Chance einer Schwangerschaft, indem du nicht nur den Tag deines Eisprungs, sondern die 4 Tage kennst, an denen deine Fruchtbarkeit am allerhöchsten ist.



## Fruchtbarkeit tracken für ein natürlich hormonfreies Leben

Beim Eisprung steigt die Körpertemperatur um 0,2 bis 0,5°C. femSense erkennt diesen Temperaturanstieg exakt und kann damit die fruchtbarste Zeit feststellen.

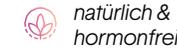

### So geht's:




#### 1. App downloaden

Die femSense App ist in allen Stores gratis verfügbar. Einfach herunterladen, anmelden und Zyklusdaten eingeben, dann berechnet die App den Klebetag.



#### 2. Patch anbringen

Die App zeigt, wann und wie der Patch unter dem Arm angebracht wird. Ab diesem Zeitpunkt misst er kontinuierlich deine Körpertemperatur, 5-7 Tage lang.

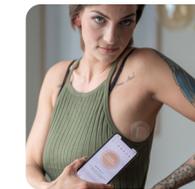

#### 3. Fruchtbarkeitsstatus ablesen

Der Patch wird zweimal täglich mit dem Smartphone via NFC in Sekundenschnelle ausgelesen. femSense informiert dich täglich über deinen Fruchtbarkeitsstatus!

