


Tragbare UVC Desinfektionstasche

Bedienungsanleitung

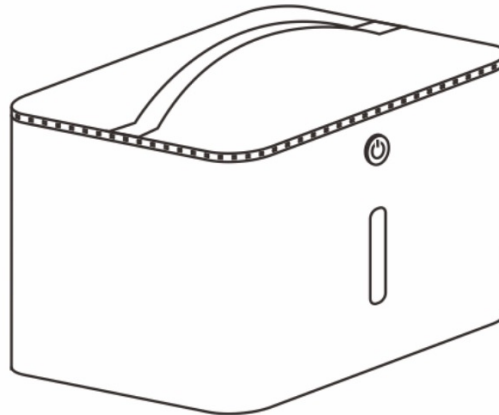

Modell: HB-SB01

Bitte lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig und vollständig durch.

Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, damit es zukünftig zur Verfügung steht.

Technische Spezifikationen

1. Produktbezeichnung: Tragbare UVC Desinfektionstasche
2. Modell: HB-SB01
3. LED Dioden: 12 Stück
4. Größe: 255 x 210 x 160 mm
5. Nettogewicht: 720 g
6. Stromversorgung: Micro-USB
7. Wellenlänge: 260 - 280 nm
8. Eingang: 5V == 2A

Lieferumfang

- 1) Desinfektionstasche
- 2) Bedienungsanleitung
- 3) USB-Kabel
- 4) Adapter

Ref. der häufigen Keime und der daraus resultierenden Krankheiten

Bakterien	Krankheiten, die verursacht werden können
Escherichia coli	Durchfall, Sepsis, Harnwegsinfektion usw.
Influenzavirus	Influenza, Vogelgrippe usw.
Eberthella typhi	Typhus, Gastroenteritis, Sepsis usw.
Bacillus dysenteriae	Enterische Infektionskrankheiten wie Hepatitis A und Hepatitis B.
Gonokokken	Urethritis, Zervizitis, Arthritis usw.
HFMD	Fieber, Hautausschlag, Myokarditis, Meningitis usw.
Norwalk-Viren	Infektiöser Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen usw.
Tuberkelbazillus	Tuberkulose, Entzündung usw.
Andere	Es wurden noch keine UV-resistenten Bakterien gefunden


Hinweis: Die oben genannten Inhalte sind Gegenstand der Wissenschaft der Pathobiologie.

Einführung


Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Aufbewahrungssterilisationsbox mit Sterilisations- und Desodorierungsfunktion durch UV-Sterilisationstechnologie. Mit nur einem Knopfdruck starten Sie die 3 Minuten dauernde Schnellsterilisation und Desodorierung. Sterilisationsrate bis zu 99,9%.

Anwendung


1. Öffnen Sie den Reißverschluss und den Deckel der Box. Legen Sie das Gitter in die Tasche.

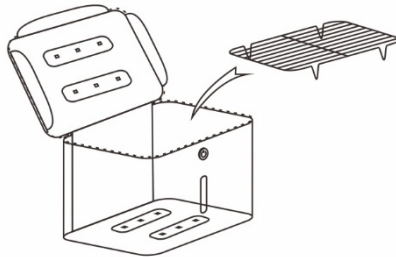


2. Legen Sie die zu desinfizierenden, trockenen Gegenstände flach in die Box. Nicht aufeinander legen oder stapeln.

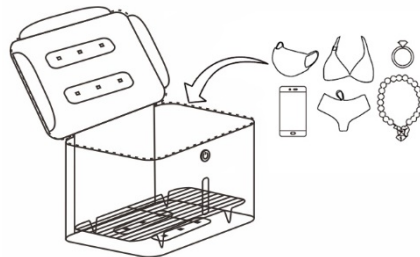

3. Schließen Sie die Stromversorgung oder das Netzteil an und verschließen Sie die Box mit dem Reißverschluss.

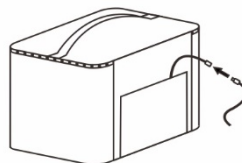

4. Klicken Sie auf den Knopf, um die 3 Minuten dauernde Sterilisation und Desodorierung zu beginnen. Die Kontrollleuchte blinkt drei Minuten lang während der Sterilisation.

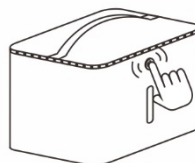

5. Nach der Sterilisation leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft. Die Gegenstände können herausgenommen werden.

Anwendungsbereich

Sterilisation der Oberflächen von (Gebrauchs-)Gegenständen, wie Unterwäsche, Kosmetikartikel, Babykleidung und Flaschen, Hygieneartikel usw.

Schutz und Sicherheit

Das UV-LED-Licht wird sofort ausgeschaltet, sobald die Sterilisationsbox geöffnet wird.

Sterilisationsprinzip

UV-C LED-Licht tötet Bakterien ab, indem es die DNA oder RNA zerstört, um deren Fortpflanzung und Vermehrung zu verhindern.

Statusinformation

Arbeitsstatus	Kontrollleuchte
Sterilisation beendet/Standby	An
Sterilisation	Blinkt
Ruhemodus	Aus

Hinweis: Der Ruhemodus ist aktiv und die Kontrollleuchte erlischt automatisch, wenn keine Handlung ausgeführt wird. Klicken Sie auf die Sterilisationstaste, um den Standby-Modus erneut aufzurufen.

Produkteigenschaften



Effiziente Sterilisation in nur 3 Minuten. Jederzeit und überall sterilisieren, um Keime fernzuhalten.



Ultraviolette Strahlen können die Molekularstruktur von DNA oder RNA in Bakterien und Viren zerstören, Zelltod und (oder) regenerativen Zelltod verursachen und erzielen so den Sterilisations- und Desinfektionseffekt.



LED-UV-Strahlen können auch den muffigen Geruch der Kleidung und geruchsverursachende Rückstände entfernen. Dies verlängert die Arbeitszeit entsprechend. (Der Eigengeruch eines Artikels kann nicht entfernt werden, der Effekt ist nicht erkennbar.)

Vorsicht

1. Stellen Sie vor der Sterilisation sicher, dass der Reißverschluss verschlossen ist.
2. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass der Adapter angeschlossen ist.
3. Drücken Sie auf den Knopf, um das Gerät aus dem Ruhezustand in den Standby-Modus zu holen.
4. Verwenden Sie einen spannungskonformen Adapter, sonst kann das Produkt beschädigt werden.
5. Legen Sie während des Gebrauchs keine starken Magnete in die Nähe der Box.
6. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.
7. Um den muffigen Geruch aus Kleidung zu entfernen, braucht das Gerät 2-3 Sterilisationszyklen.



Nicht auf die Box treten



Augen und Haut nicht dem UV-Licht aussetzen



Nicht für Kinder geeignet



Nicht waschen oder einweichen

Garantie und Service

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und sorgfältig durch und befolgen Sie die Anwendungsanweisungen genau. Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann es zu Geräteschäden und Personenschäden kommen. Der Hersteller ist nicht für Sicherheits-, Zuverlässigkeits- und Leistungsprobleme und jegliche andere Überwachungsabweichung, Personenschäden oder Geräteschäden aufgrund von Fahrlässigkeit des Anwenders verantwortlich. Die Garantie des Herstellers deckt dies nicht ab.

Wir leisten 1 Jahr Garantie für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile
- für Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren
- bei Eigenverschulden des Kunden

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt.

Für die Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen.

Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 1 Jahr ab Kaufdatum gegenüber der Novidion GmbH, Fuggerstr. 30, 51149 Köln, Germany geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei uns oder bei von uns autorisierten Werkstätten.

Weitergehende Rechte werden dem Kunden, aufgrund der Garantie, nicht eingeräumt.

Hersteller:

Health & Beauty (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

Room 302, 7 Lanyuan Road, Zhangkengjing Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen, China.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Novidion GmbH

Fuggerstr. 30

51149 Köln

Tel.: 02203 – 9885 200

Fax: 02203 – 9885 206

info@novidion.de

www.pulox.de

WEEE-Registrierungsnummer: DE24355330

Sollten Sie beim Lesen dieser Anleitung Probleme haben, so können Sie diese auch auf unserer Website downloaden

<http://www.pulox.de/Anleitungen-Datenblaetter-Retouren>