

PÈSE-PERSONNE NUMÉRIQUE

7810



MODE D'EMPLOI

Lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation.

1. PROPRIÉTÉS:

Charge max.:	150 kg / 330 lb
Division:	0.1 kg / 0.2 lb
Affichage:	LC-Display, 4 chiffres
Batterie:	1x CR2032
Température de fonctionnement:	0° - 35° C
Unités:	kg / lb / st
Fonction d'arrêt automatique:	après 8 secondes de non-utilisation

2. MODE D'EMPLOI

Veillez retirer le film plastique de la batterie avant de l'utiliser.

Placez la balance sur une surface plane. Un sol inégal nuit à la précision de la mesure. Montez sur la balance et commencez à peser. La mesure est affichée pendant 8 secondes. Descendez de la balance. La balance s'éteint automatiquement.

Remplacez la pile lorsque "LO" ou "----" apparaît à l'écran.

Changer d'unité en appuyant sur le bouton en bas de la balance.

Garder l'équilibre au sec.

3. ATTENTION

Ne chargez pas la balance après utilisation afin d'éviter une décharge involontaire de la batterie. Essayez de vous tenir au milieu de la plate-forme pour éviter de glisser.

Restez immobile sur la balance pour éviter des lectures inexactes.

Garder l'équilibre au sec. Ne nettoyez pas la balance sous l'eau courante.

Retirez la batterie si vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période.

4. ERREURS ET REMÈDES

Erreur	Raison	Remèdes
"LO" or "----"	La batterie est vide.	Remplacer la batterie.
"ERR"	L'équilibre est instable.	Poser la balance sur une surface plane.
"---"	Apparaît pendant la pesée : la capacité maximale a été dépassée.	Descendre du pèse-personne.

Soehnle Industrial Solutions GmbH

Gaildorfer Straße 6
DE-71522 Backnang
GERMANY

Telefon: +49 (0) 71 91 / 34 53 - 220
Telefax: +49 (0) 71 91 / 34 53 - 211
info@soehnle-professional.com
www.soehnle-professional.com