

## Vorbereitung

Lanzettentrommel einsetzen



1. Kappe abziehen

2. Trommel einführen

3. Kappe aufsetzen



Drehen Sie die Kappe bis die gewünschte Stechtiefe an der Markierung steht.

## Blutgewinnung

Einfach nur 1 Klick!

**Nur 1 Klick zum Spannen und Auslösen**



Drücken Sie den Auslöseknopf vollständig nach unten, um Blut zu entnehmen.

## Nachbereitung

Lanzettentrommel bereitstellen und entfernen



1. Hebel bis zum Anschlag erst nach unten, danach wieder nach oben bewegen.

2. Bei der Entfernung Kappe ab- und Trommel heraus ziehen.

Unbenutzte Trommel



Benutzte Trommel

**Achtung:** Lanzettentrommel nicht entfernen, bevor alle Lanzetten aufgebraucht sind. Einmal entfernt, kann die Trommel aus hygienischen Gründen nicht wieder eingesetzt werden.