

DIGITALE PERSONENWAAGE

7810



GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

1. EIGENSCHAFTEN:

Höchstlast:	150 kg / 330 lb
Zifferschritt:	0.1 kg / 0.2 lb
Anzeige:	LC-Display, 4 Ziffern
Batterie:	1x CR2032
Arbeitstemperatur:	0° - 35° C
Einheiten:	kg / lb / st
Automatische Abschaltfunktion:	nach 8 Sek. bei Nichtgebrauch

2. GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte entfernen Sie die Plastikfolie von der Batterie, bevor Sie sie verwenden.

Stellen Sie die Waage auf einen ebenen Boden. Ein unebener Boden beeinträchtigt die Messgenauigkeit. Stellen Sie sich auf die Waage und beginnen Sie mit dem Wiegen. Die Messung wird für 8 Sekunden angezeigt. Treten Sie von der Waage. Die Waage schaltet sich automatisch aus. Ersetzen Sie die Batterie, wenn auf dem Display "LO" oder "---" angezeigt wird. Wechseln Sie die Einheiten, indem Sie die Taste am unteren Ende der Waage betätigen. Halten Sie die Waage trocken.

3. ACHTUNG

Bitte belasten Sie die Waage nach dem Gebrauch nicht, um ein ungewolltes Entladen der Batterie zu vermeiden. Versuchen Sie, in der Mitte der Plattform zu stehen, um ein Abrutschen zu vermeiden. Stehen Sie still auf der Waage, um eine ungenaue Ablesung zu vermeiden. Halten Sie die Waage trocken. Reinigen Sie die Waage nicht unter fließendem Wasser. Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzen.

4. FEHLER & ABHILFEN

Fehler	Grund	Abhilfe
"LO" or "---"	Batterie ist leer.	Batterie wechseln.
"ERR"	Waage ist instabil.	Stellen Sie die Waage auf einen ebenen Boden.
"---"	Erscheint während des Wägevorgangs: Maximale Kapazität wurde überschritten.	Treten Sie von der Waage.

Soehnle Industrial Solutions GmbH
Gaildorfer Straße 6
DE-71522 Backnang
GERMANY

Telefon: +49 (0) 71 91 / 34 53 - 220
Telefax: +49 (0) 71 91 / 34 53 - 211
info@soehnle-professional.com
www.soehnle-professional.com