

Sicherheit- & Montagehinweise

Behelfsmaske

Hinweise:

Vor Gebrauch lesen Sie bitte die Sicherheits- und Gebrauchshinweise.

Beachten Sie die in Ihrer Organisation vorhandenen Vorschriften. Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen auf.

Diese Behelfsmaske ist kein medizinisch zertifiziertes Produkt. Anwendung & Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Eine Reinigung bzw. Desinfektion vor Erstanwendung wird empfohlen, siehe Abschnitt „Reinigung und Desinfektion“.

Lieferumfang:

Die Behelfsmaske wird als Bausatz geliefert und enthält die folgenden Komponenten:

- 1 x Grundkörper Behelfsmaske
- 1 x Mundschild Behelfsmaske
- 2 x Befestigungsbänder (1 x 33cm lang (schwarz) + 1 x 27cm lang (weiß))
- 10 x Filter


Ersatzteile / Zubehör:

- Ersatzfilter 1 VE=100 Filter
- Befestigungsband zum Austausch 1 VE= 50 Bänder


Montage / Zusammenbau:

1. Reinigen Sie den Grundkörper sowie das Mundschild entsprechend den Empfehlungen im Abschnitt Reinigung und Desinfektion.

2. Befestigen Sie das Mundschild auf einer Seite am Maskengrundkörper mit Hilfe der beiden Rastpunkte.

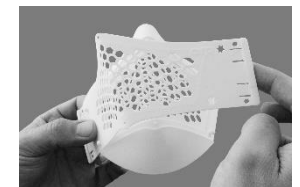

3. Legen Sie den Filter in die Aussparung des Grundkörpers, beginnend auf der zuvor befestigten Seite.

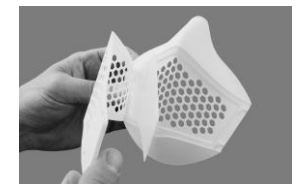

cirp GmbH
Römerstraße 8
D-71296 Heimsheim

Telefon +49 (0) 7033.30987-0
Fax +49 (0) 7033.30987-50
www.cirp.de
info@cirp.de

4. Befestigen Sie nun den Mundschild auf der gegenüberliegenden Seite mit Hilfe der Rastpunkte. Achten Sie dabei darauf, dass sich der Filter gleichmäßig an den Maskengrundkörper anlegt.



5. Prüfen Sie die Verrastung.
6. Der Grundkörper und das Mundschild sollten annähernd flächenbündig sein
7. Führen Sie das Kopfbänder von innen nach außen in die dafür vorgesehenen Öffnungen am äußeren Rand des Mundschildes. Das schwarze (längere) Befestigungsband muss in der oberen Öffnung (zur Nase hin) befestigt werden.



Gebrauch:

- Setzen Sie die Behelfsmaske so auf, dass Mund und Nase bedeckt sind.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich das weiße Befestigungsband zuerst über den Kopf ziehen.

Austausch des Filters:

Bitte beachten Sie hierzu auch den Abschnitt Reinigung und Desinfektion. Zum Austausch der Filter lösen sie die Verrastung des Mundschildes auf einer Seite indem Sie das Mundschild auf einer Seite an den Rastpunkten anheben. Die Verrastung sollte sich ohne größeren Kraftaufwand lösen lassen. Entnehmen Sie den alten Filter. Sie können nun den Neuen Filter entsprechen dem Abschnitt Montage / Zusammenbau einsetzen. Verwenden Sie keine Werkzeuge oder spitze Gegenstände Beschädigte Komponenten sollten nicht wiederverwendet werden! Der Filter ist regelmäßig zu ersetzen und kann nicht gereinigt werden.

Verwendete Materialien:

- Maske: Polyamid PA12
- Filter: Polypropylen PP
- Befestigungsbänder: 25% Polyester; 75% Latex

Reinigung und Desinfektion:

- Eine Desinfektion mit handelsüblichen Flächendesinfektionsmitteln wird empfohlen. Vor der ersten Anwendung testen sie die Verträglichkeit an einer geeigneten Stelle.
- Von der Reinigung mit phenolhaltigen Chemikalien wird abgeraten.
- Bei groben Verunreinigungen kann der Grundkörper und das Schild mit handelsüblichen Geschirrrreinigern vorgereinigt werden.
- Eine Reinigung der Maske in einem haushaltsüblichen Geschirrspüler ist auch möglich.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel!
- Beachten Sie bei der Verwendung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln die Herstellerhinweise
- Alternativ kann die Maske vaporisiert werden. Bitte beachten Sie dass über 130°C das Material warmverformbar ist. Deshalb sollt die Maske nur kurzzeitig Temperaturen von max. 130°C zur Reinigung (Vaporisation) ausgesetzt werden.

Verträglichkeit:

Latex kann allergische Reaktion auslösen. Bei einer bekannten Intoleranz raten wir von der Verwendung der Befestigungsbänder ab. Weitere Intoleranz Reaktionen sind nicht bekannt.

Lagerung:

Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern.

- Maximale Lagerfähigkeit 2 Jahre
- Temperaturbereich -20°C bis +60°C

Entsorgung:

Das Produkt kann thermisch verwertet werden oder auf Deponien entsorgt werden.

Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei geltende Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten!