



### Thermometergehäuse



**HINWEIS** Vor der Reinigung eine neue Sondenhülle auf das Thermometer stecken.

#### Zugelassene Reinigungsmittel

- 70%iger Isopropylalkohol oder Ethylalkohol
- Wasserstoffperoxid (Virox, Oxivir)
- Quaternäre Ammoniumverbindungen (CaviWipes™, Clinell Universal Wipes®, Sanicloth)
- 10%ige Hypochloritlösung




Trocken reiben. 5 Minuten warten, damit sie vollständig trocknen können. Sicherstellen, dass das Thermometergehäuse vor der Verwendung trocken ist.

### Thermometerkontakte



#### Zugelassene Reinigungsmittel

- 70%iger Isopropylalkohol oder Ethylalkohol

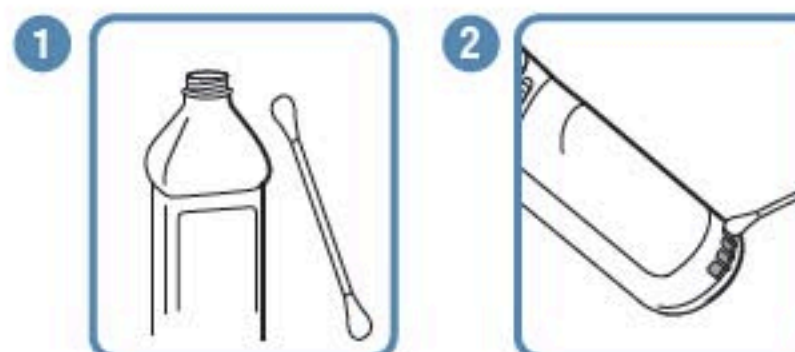

Das Thermometer 1 Minute lang liegen lassen, damit die Kontakte an der Luft trocknen können.

### Linsefenster und Sonde



#### Zugelassene Reinigungsmittel

- Nur 70%iger Isopropylalkohol oder Ethylalkohol!



Trocken reiben. 5 Minuten warten, damit sie vollständig trocknen können. Sicherstellen, dass die Sondenspitzenlinse vor der Verwendung trocken ist.

