


## Réglage du profil

### Réglages des paramètres personnalisés

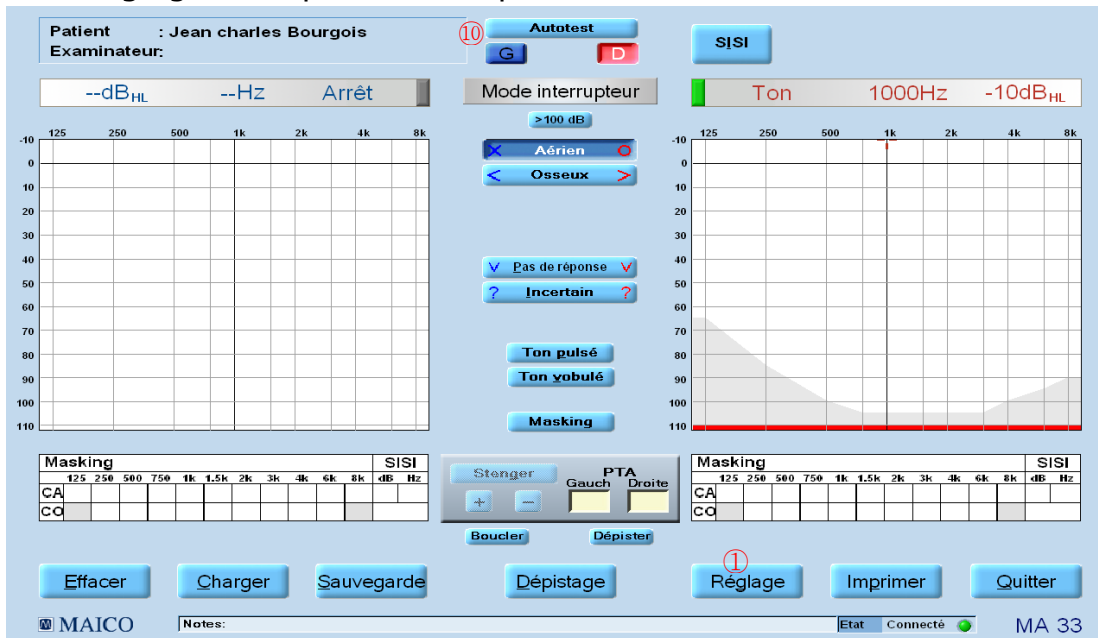

Pour effectuer des réglages personnalisés par l'utilisateur :

1. Appuyer sur « réglage » ①
2. Activer « demande du praticien » ②
3. Identification du praticien ③
4. Effectuer les réglages personnalisés :
  - Attribuer les audiogrammes G - D ④
  - Afficher les courbes de niveau de référence ⑤
5. Effectuer les réglages d'impression :
  - Appuyer sur imprimer ⑥
  - Afficher les courbes de niveaux de référence ⑦
  - Options de mise en page ⑧
  - Ajout adresse ⑨
6. Dans chacun des menus appuyer sur « OK » pour valider



## Audiométrie automatique



1. Cliquer sur **autotest** (ⓐ) pour afficher l'interface de test automatique, ajuster les paramètres d'essai avant de lancer le test (niveau de départ, niveau min/max, durée de pause et configuration de la répétition des tests (ⓐ))
2. Cliquer sur le bouton démarrer / pause pour lancer le test (ⓑ), si le message vocal est activé, le patient entendra une voix lançant le test.
3. Le patient entend des tonalités/sons doux avec un niveau augmentant automatiquement. Quand un signal est détecté, le patient doit appuyer sur le bouton de réponse et l'intensité du son diminue de 10 dB.
4. Le seuil d'audition doit être confirmé deux fois sur trois, le seuil est confirmé et affiché dans le tableau (ⓒ) et sur l'audiogramme.
5. Arrêt du test en cliquant sur le bouton stop / arrêt (ⓓ).
6. Le test automatique reconnaît les erreurs, il peut répéter le test aux mêmes fréquences.
7. Si le patient appuie sur le bouton réponse trop souvent, une voix lui demandera de répondre correctement.

## Raccourcis clavier

Touches de fonctions	Touches directes	Touches combinées
F1 : aide	Barre d'espace : Son on/off	Alt + X : sortie programme
F2 : interrupteur tonalite	Pos1 : retour à 1Khz	Alt + T : menu-réglages
F3 : interrupteur oreille gauche et droite	Entrée : sauvegarde des valeurs	Alt + E : sortie
F4 : masquer coté droit on / off	?: réponse incertaine	Alt + C : dépistage
F5 : conduction aérienne	Tab : passer de gauche à droite	Alt + U : réponse incertaine
F6 : conduction osseuse	Ctrl : Passer du mode interrupteur/présentation	Alt + R : imprimer
F8 : pulsation on / off	Up : diminuer le niveau	Alt + W : tonalité modulé
F9 : masquer coté gauche on / off	Down : augmenter le niveau	Alt + P : tonalité pulsé
F10 : > 100dB	Pic up : diminuer le niveau de l'oreille opposée	Alt + L : charger (MAICO)
F11 : passer de UCL à MCL	Pic down : augmenter le niveau de l'oreille opposée	Alt + N : nouveau (NOAH)
F12 : interrupteur / présentateur		Alt + D : effacer les mesures Alt + S : enregistrer les mesures

### Touches directes :

R : oreille droite  
G : oreille gauche  
B : binaural  
S : arrêt  
P : démarrer  
E : fin du test N : aucun son